


Esy[®]-Revision Blade

Surgical tool for Revision THA

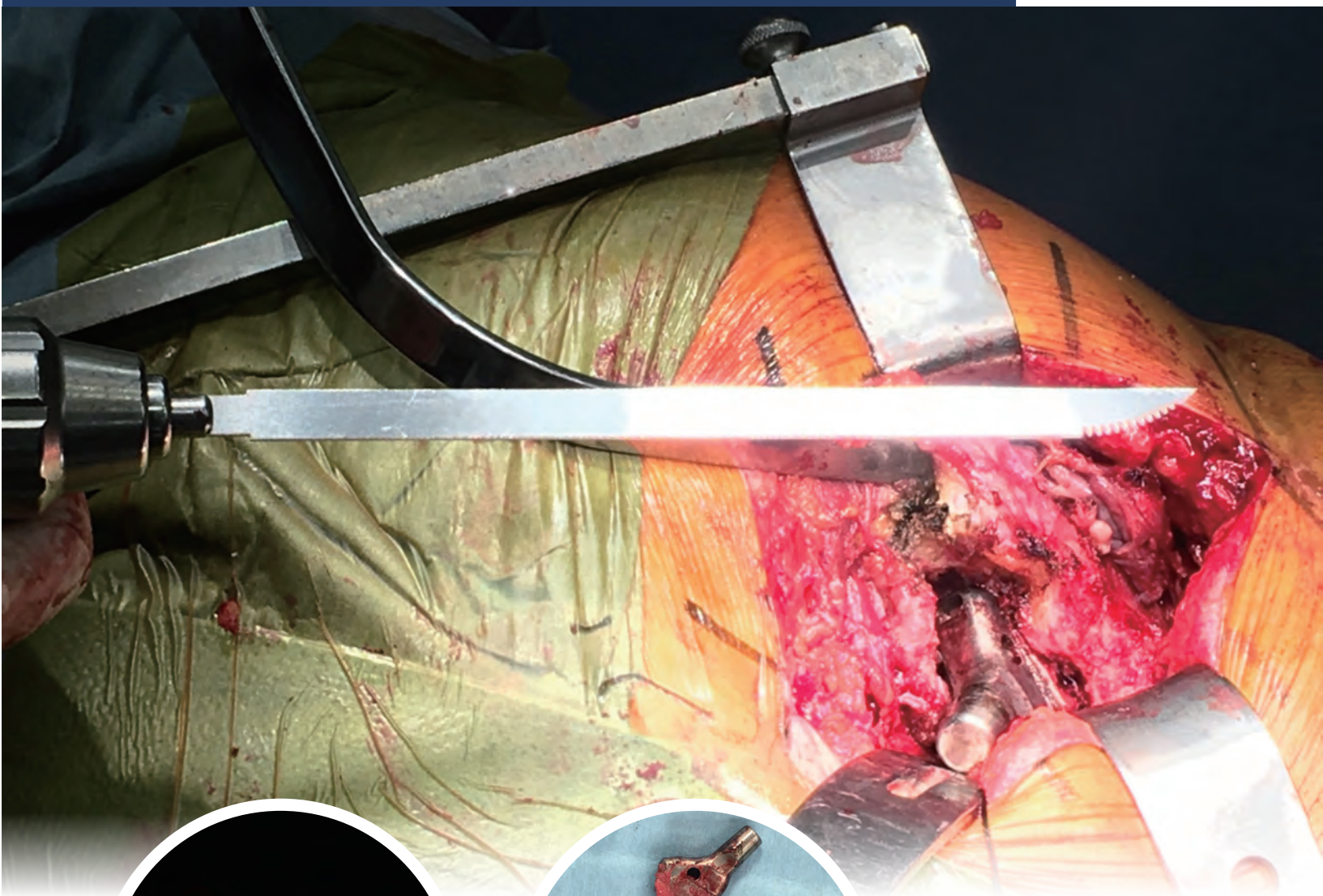

Esy®-Revision Blade

人工股関節再置換術におけるセメントレス大腿骨ステム抜去の際、従来法では薄刃ノミとハンマーなどにて骨-ステム間のInterfaceを慎重に剥がしていくことがしばしば散見されます。Esy®-Revision Bladeはレシプロソーに装着し、大腿骨の軸方向への動きにより骨-ステム間のInterfaceをスムーズに剥がしていくことを目的として開発された器械です。


Concept

User-friendly	レシプロソー装着によるスムーズな剥離を期待
Safety	適度なブレード厚みや幅による骨穿孔に対する安全性
Cost performance	手術時間短縮の可能性


Design

Esy®-Revision Bladeは比較的に目視可能な近位用(ショート)には全刃デザインを採用し、髓腔内を目視し難い遠位用(ロング)にはブレード側面で過剰に骨を削らないように先端部分刃のデザインを採用しております。また、弾性を考慮した適度なブレード幅・厚は髓腔内よりブレードが骨穿孔しづらい機能を期待したデザインを採用しております。


Esy-Revision Blade
ロング片刃(遠位用)ストライカー用
製品番号 PO-008-01S

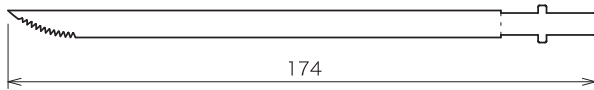


Esy-Revision Blade
ロング片刃(遠位用)パワープロ用
製品番号 PO-008-01P

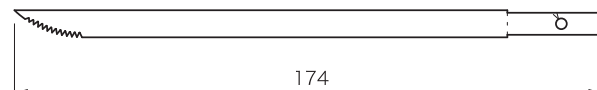


Esy-Revision Blade
ロング両刃(遠位用)ストライカー用
製品番号 PO-008-02S

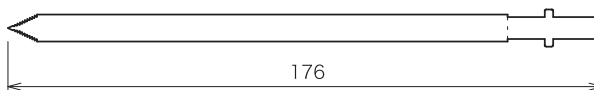


Esy-Revision Blade
ロング両刃(遠位用)パワープロ用
製品番号 PO-008-02P

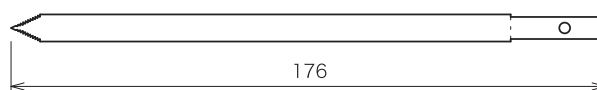

Esy-Revision Blade
ショート(近位用)ストライカー用
製品番号 PO-008-03S

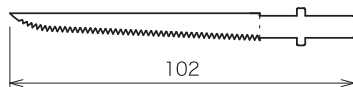

Esy-Revision Blade
ショート(近位用)パワープロ用
製品番号 PO-008-03P

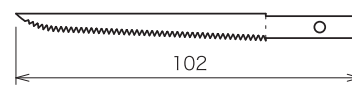

届出番号 26B2X10024000138
器40 医療用のこぎり 一般医療機器
手術用のこぎり(13448001)
プラスオーソ リビジョンブレード

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 トゥルーシード株式会社
京都府京都市中京区宗林町98 英守ビル207
TEL 075-708-5275

株式会社プラスオーソ 港北NTオフィス
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-13-701
TEL 045-595-9132 FAX 045-595-9133

ホームページ <http://www.plusortho.co.jp/>